

Arvoisa asiakas,

Menetelmä-, tekopaikka- ja viitearvomuuutos

Androstendioni

S -ADIONI KL 1085

Androstendionin radioimmunologisen menetelmän (uutto+RIA) korvaa nestekromatografia-tandem-massaspektrometrinen menetelmä (LC-MS/MS). Menetelmävaihdoksen yhteydessä viitearvot muuttuvat.

Tutkimus tehdään alihankintana.

Viitearvot

Pojat	ennen puberteettia	0.2 – 1.3	nmol/l
	puberteetin vaihe 2-3	0.7 – 3.0	nmol/l
Tytöt	ennen puberteettia	0.2 – 1.0	nmol/l
	puberteetti ennen menarkea	0.6 – 2.5	nmol/l
Miehet		1.0 – 9.1	nmol/l
Naiset		0.3 – 10.3	nmol/l

Näyte 1 ml seerumia (geeliputkia ei voi käyttää).

Näyte otetaan klo 8 - 12.

Fertiili-ikäisellä naispotilaalla näyte tulee ottaa kierron 4. - 7. päivänä. Stressi nostaa arvoja.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 1-2 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pitempiä aikaista säilytystä varten näyte pakastetaan, tällöin lähetys pakastettuna.

Tekotiheys

Tehdään 1 x viikko, valmis 7 työpäivässä.

Muutos koskee tuloksia, joiden vastaamisajankohta on 29.3.2010 ja sitä myöhemmin.

Tiedustelut:

Kemisti Liisa Ahola
puh. (09) 5256 279
liisa.ahola@medix.fi

Hintatiedustelut:

Kaupallinen johtaja Heikki Aaltonen
puh. (09) 525 6256
etunimi.sukunimi@medix.fi