

Arvoisa asiakas,

Muistutus D-1,25-vitamiinitutkimuksen näytematriisista**D-vitamiini-1,25-OH****S -D-1,25 KL 3163**

Haluamme muistuttaa, että D-1,25-vitamiinitutkimuksen näytematriisiin tulee olla seerumi. Tarkistatthan näytematriisin tiedoistanne. Plasmanäyte saattaa aiheuttaa määritysmenetyksessä käytettävien magneettipartikkeleiden tarttumisen toisiinsa, jolloin saatu tulos ei ole luotettava.

Näyte

1 ml seerumia (plasma ei sovellu määrittämiseen).

Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Tiedustelut:

kemisti Hannakaisa Jaatinen

puh. 040 922 3140

hannakaisa.jaatinen@medix.fi