

Arvoisa asiakas,

**Uusi biologisen lääkkeen pitoisuus- ja vasta-ainepaketti valikoimaan**

**Vedolitsumabi, pitoisuus- ja vasta-aine-paketti**

**S -VedolPa    ATK 10209**

**Osatutkimukset (ei tilattavissa erikseen)**

**S -Vedol        ATK 10200**

**S -VedolAb     ATK 10206**

Tutkimusvalikoimamme on laajentunut vedolitsumabin pitoisuus- ja vasta-ainepaketilla. Tutkimuspaketissa määritetään ensin vedolitsumabin pitoisuus. Pitoisuuden ollessa  $\leq 5,0 \mu\text{g/ml}$ , määritetään näytteestä myös lääkevasta-aineet vedolitsumabia vastaan. Jos jäännöspitoisuus on yli edellä mainitun pitoisuusrajan, ei lääkevasta-aineita tutkita. Osatutkimukset teetetään alihankintana.

<b>Indikaatiot</b>	Vedolitsumabin annosteluvälin päättäminen hoidon alkuvaiheessa (6 vko). Päätöksenteon tueksi annostelun myöhempään muutokseen tai lääkevaihtopäätökseen liittyen, esimerkiksi epäiltäessä puutteellista tehoa tai tehon hiipumista.
<b>Näyte</b>	1-2 ml seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.  Näyte tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkennosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus). Vedolitsumabi-pitoisuuden tutkimisesta on osoitettu olevan hyötyä ainakin, kun näyte on otettu 6 vko lääkityksen aloituksesta.
<b>Säilytys ja lähetys</b>	Näyte säilyy 2 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.
<b>Menetelmä</b>	Pitoisuusmääritys: EIA Lääkevasta-ainemääritys: RIA
<b>Tekotiheys</b>	1-2 viikon välein
<b>Vastausaika</b>	10-15 arkipäivää
	Erittäin suurten ja pienten pitoisuuksien vastaaminen voi kestää kauemmin.

**Huomautus**

Tuloksista annetaan lausunto. Lausuntoa varten pyynnön yhteydessä on mainittava diagnoosikoodi, hoidon aloituspäivämäärä, edellisen annoksen päivämäärä, mittaamisen syy, onko kyseessä jäännöspitoisuusmittaus ja onko käytössä oheislääkkeitä (AZA/6MP/MTX).

Lisätietokysymykset tulee lisätä käytössä olevaan tietojärjestelmään. Kysymysten tarkemmista lisätiedoista ja tietoliikennetestauksesta voitte olla yhteydessä tietohallintoomme.

**Tiedustelut:**

Dos., kliinisen mikrobiologian erik.lääk.  
Sakari Jokiranta  
puh. 050 547 1184  
sakari.jokiranta@medix.fi

**Hintatiedustelut:**

markkinointi@medix.fi

**Tietohallinto:**

järjestelmäasiantuntija Maria Leppänen  
puh. 043 825 9315  
maria.leppanen@medix.fi