

Arvoisa asiakas,

Menetelmä- ja näytteenotto-ohjeistusmuutos

Treponema pallidum, vasta-aineet
S -TrpaAb KL 4942

Otamme käyttöön uuden automatisoidun menetelmän syfiliksen (kupan) diagnostiikkaan ja seulontaan. Menetelmämuutos mahdollistaa *T. pallidum* vasta-ainetutkimuksen tekemisen päivittäin laboratoriomme aukioloaikojen puitteissa, mikä lyhentää vastausaikoja. Muutos ei vaikuta tutkimuksen rakenteeseen, viitearvoihin tai tuloksen tulkintaan.

HUOM! Päivitetty näytteenotto-ohjeistus

Näyte

1,5 ml seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta eroteltava geelin päältä välittömästi sentrifugoinnin jälkeen.

Säilytys ja lähetys

Näyte eroteltava geelin päältä aina ennen lähettämistä. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, **muuten kylmälähetys**. Seerumi säilyy jääkaapissa 7 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

CMIA

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika (arkipäivää)

Samana päivänä.

Mahdolliset jatkotutkimukset saattavat pidentää vastausaikaa.

Muutos astuu voimaan 6.3.2017, mistä alkaen näytteet on otettava uuden ohjeistuksen mukaisesti.

Tiedustelut:

sairaalakemisti Heidi Nousiainen
puh. 050 401 0726
heidi.nousiainen@medix.fi