

Arvoisa asiakas,

Hematokriitin määrittäminen fE-Folaat tutkimuksen yhteydessä

Folaatti
fE-Folaat **KL 1414**

Punasolujen folaatin laskentaa varten tarvitaan aina tieto hematokriitista (B -HKR KL1358). Hematokriitti tulee olla mitattu samanaikaisesti otetusta näytteestä kuin folaatti. Mikäli fE-Folaat tutkimuspyynnöstä puuttuu hematokriittitulos, **teemme jatkossa näytteelle automaattisesti B -HKR pyynnön** ja laskutamme B -HKR tutkimuksen hinnan, jos näyte on vielä analyysikelpoinen hematokriitin suhteen.

Näyte

fE-Folaat: 1 ml (minimi 0.5 ml) EDTA-paastoverta (ei hepariini). Punasolujen folaatin (fE-Folaat) laskemiseksi tarvitaan näytteen hematokriittiarvo mahdollisimman tuoreesta näytteestä (B -PVK). Täten asiakkaan tulisi määrittää hematokriitti ennen näytteen lähettämistä ja ilmoittaa tulos folaattipyynnön yhteydessä tai lähettämään oma EDTA-putki ja pyyntö HKR-tutkimukselle. Näyte suojataan suoranaiselta auringonvalolta.

Säilytys ja lähetys

fE-Folaat: Säilytys jääkapissa 2 vrk. Voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, jolloin voidaan tarvittaessa määrittää hematokriitti. Näyte voidaan tarvittaessa pakastaa, jolloin myös lähetys pakastettuna. **Huom.!** HKR:n määrittäminen ennen pakastamista.

Muutos astuu voimaan heti.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu
puh. (09) 525 61