

Arvoisa asiakas,

Tutkimuksen menetelmä ja viitearvot muuttuvat

Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1

S -IGF1 **KL 3253**

Vaihdamme S -IGF1 -tutkimuksen määrittämenetelmän toiselle analysaattorille. Menetelmän periaate (CLIA, kemiluminesenssi immunomääritys) ja jäljitettävyyys pysyvät samoina. Uudella määrittämenetelmällä tulostaso on keskimäärin 10% korkeampi. Tutkimuksen viitearvot muuttuvat. Plasma ei jatkossa sovellu näytteeksi, mutta säilytys- ja lähetysohjeet säilyvät ennallaan.

Näyte 1 ml (0,5 ml) seerumia. Erotus mahdollisimman pian.

Uudet viitearvot

Ikä (vuosi)	Tytöt / Naiset Viitearvot (nmol/l)	Pojat / Miehet Viitearvot (nmol/l)
<1	1 - 17	1 - 13
1 - 2	1 - 21	2 - 19
3	2 - 24	2 - 22
4	2 - 28	2 - 26
5-6	2 - 38	2 - 35
7-8	4 - 51	2 - 45
9	6 - 59	3 - 50
10	8 - 66	4 - 55
11	10 - 71	5 - 60
12	12 - 76	6 - 63
13	14 - 77	8 - 66
14 - 16	15 - 77	11 - 68
17 - 18	15 - 62	17 - 64
19 - 20	14 - 52	17 - 56
21 - 25	13 - 46	13 - 47
26 - 40	10 - 40	11 - 35
41 - 60	6 - 35	7 - 31
61 - 85	4 - 32	4 - 32

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 13.2.2018 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

sairaalakemisti Sari Husgafvel

puh. 040 922 3142

sari.husgafvel@medix.fi