

## PAKETTI- JA RASITUSTUTKIMUKSET, NÄYTTEIDEN PAKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN

Tutkimuskohtaiset ohjeet löytyvät Yhtyneet Medix laboratorioden (YML) nettisivuilta [www.synlab.fi/Laboratoriokäsikirja](http://www.synlab.fi/Laboratoriokäsikirja) /Laboratoriokäsikirja, Yhtyneet Medix Laboratoriot / Laboratoriokäsikirja / Tutkimukset

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt tutkimuspaketit eivät löydy YML:n laboratoriokäsikirjasta.

Näytteiden pakkaamisohjeet koskevat seuraavia pakettitutkimusnäytteitä:

- Potilaasta kaksi eri näytematriisiin näyteputkea samalla näyttenumerolla (esim. seerumiputki + EDTA-putki)
- Rasitustutkimusnäytteet, joissa on sama näyttenumero eri aikapisteiden näytteissä (esim. 0-näyte ja 2 tunnin näyte).

Paketti- ja rasitustutkimukset on lueteltu tämän ohjeen lopussa.

Jos potilastietojärjestelmästä tulostettaville viivakooditarroille tulostuu jokaiselle näyteputkelle oma näyttenumero, näytteet voi pakata muiden näytteiden sekaan, eikä tätä pakkausohjeistusta tarvitse noudattaa.

### Näytteiden pakkaaminen

Näyteputket, joissa on keskenään sama näyttenumero viivakooditarrassa, pakataan muista näytteistä erilleen alla olevan ohjeistusten mukaisesti.

### POSTIKULJETUS


Samalla näyttenumerolla olevat näyteputket pakataan muista näytteistä erilleen Minigrip®-pussiin, jonka päällä lukee punaisella **PAKETTI- JA RASITUSTUTKIMUKSET**



- Saman potilaan näyteputket laitetaan vierekkäin samaan putkimoduliin. Samassa putkimodulissa voi olla usean eri potilaan näytteitä.
- Putkimoduli ja imuliina laitetaan paketti- ja rasitustutkimus Minigrip®-pussin sisälle. Pussi suljetaan huolellisesti.
- Näytteet lähetetään postitse keltamustaraidallisessa vastauslähetyslaatikossa.

## LÄHETIKULJETUS

Samalla näyttenumerolla olevat näyteputket pakataan muista näytteistä erilleen **PUNAISEEN KANNELLISEEN STYROX-KOTELOON.**

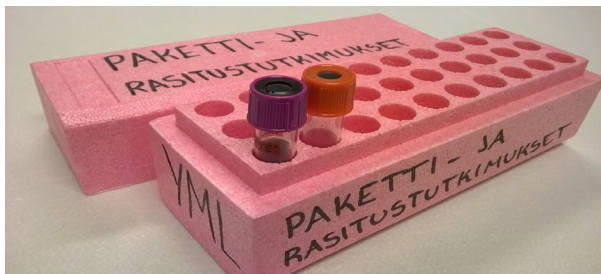

- Saman potilaan näyteputket laitetaan vierekkäin samaan koteloon. Samassa kotelossa voi olla usean eri potilaan näytteitä.
- Punainen styrox-kotelo ja imuliina laitetaan ison minigripin sisälle, joka suljetaan huolellisesti

## Näytteiden lähettäminen

Kaikki näytteet pakataan lähettikuljetuskassiin tai -laukkuun. Kassin tai laukun sivutaskussa oleva osoitekortti käännetään osoittamaan vastaanottajan osoitetta. Lähettikassit ja -laukut palautetaan asiakkaalle lähetin seuraavalla näytteiden noutokäynnillä.

## Paketti- ja rasisututkimusten lähety- ja kuljetustarvikkeet

Lähety- ja kuljetustarviketilaukset tehdään YML:n nettisivujen tarviketilauslomakkeella osoitteessa [www.synlab.fi/Laboratoriokäsikirja/](http://www.synlab.fi/Laboratoriokäsikirja/) Laboratoriokäsikirja, Yhtyneet Medix Laboratoriot / Asiakkaille / Tarviketilaukset.

## Paketti- ja rasisututkimukset

Pakkaaminen kuten pakettitutkimuksissa:

KL numero	Etuliite	Lyhenne	Tutkimusnimike	
2474	B -	PVK+T	Perusverenkuva ja trombosyytti	Kun pyydetään trombosyytit sitraattiputkesta

KL numero	Etuliite	Lyhenne	Tutkimusnimike	
2643	B -	Morfo	Solujen morfologinen tarkastelu	Kun lähetetään sekä putki että sivelyvalmisteet
3696	B -	TVK	Täydellinen verenkuva	

## Paketti- ja rasisututkimukset

KL numero	Etuliite	Lyhenne	Tutkimusnimike
92	Pt-	ADA-I	Adenosiinideaminaasi pleuraneste / seerumi
4378	P -	APCres	APC-resistenssi
641	B -	Artr	Artriittitutkimus
643	Pt-	AIT-L	Autoimmuunitutkimus, laaja
9451	Li-	BorAbXL	Borrelia, vasta-ainepaketti, laaja, likvorista
9250	Pt-	Diascr	Diascreen seulontatutkimus
1483	Pt-	Gluk-R1	Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt
9259	Pt-	GlukR1s	Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt, 0- ja 2 h näyte
9828	Pt-	GlukR1p	Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt, plasma
1484	Pt-	Gluk-R2	Glukoosi-koe, oraalinen, pitkä
4800	Pt-	Gluk-R6	Glukoosi-koe, oraalinen, raskaudenaikainen
3450	Li-	IgG-Ind	Immunoglobuliini G, indeksi
6168	Li-	IgG-Oc	Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen
9717	Pt-	Infepak	Infektiopaketti
9102	Pt-	Keli-XL	Keliakiatutkimus, laaja ja HLA-tautiassosiaatiotutkimus
2146	Pt-	Krea-Cl	Kreatiniinin poistuma
2197	Pt-	Lakt-R1	Laktoosi-koe
84	S -	MaksaT	Maksarasisututkimus
115	Pt-	Mediscr	Mediscreen seulontatutkimus
9473	Pt-	MuistiS	Muistihäiriötutkimukset, suppea
9708	Pt-	MuistiM	Muistihäiriötutkimukset, medium
4490	-	TbNhO	Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihappo (kval)
6173	B -	TbIFNg	Mycobacterium tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erityis
9169	Pt-	PienYri	Pienyrityksen työterveystutkimuspaketti
647	Pt-	Pleur-T	Pleuriittitutkimus
648	Pt-	Pleur-L	Pleuriittitutkimus, laaja
9009	Pt-	Tark4	Tarkastuspaketti 4, Hb ja peruskemia
4025	P -	Trombot	Tromboositaipumuksen selvittely
9352	Pt-	TTHSCR	TTH-SCREEN terveystarkastus
9354	Pt-	TTHSCRE	TTH-SCRELA terveystarkastus, erittäin laaja
9353	Pt-	TTHSCRL	TTH-SCRLA terveystarkastus, laaja
10504	Pt-	FIB-4	Fibrosis-4 indeksi