

## Asiakastiedote

54/2021

16.12.2021

Sivu 1(2)

Arvoisa asiakas,

Tämän tiedotteen muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä

### Viitearvo- ja tekopaikkamuutos

#### Kylmähemagglutiniinit S -Kyhemag KL 2173

Tutkimus siirretään tehtäväksi alihankintalaboratorioon.

**Näyte** 0,5 ml lämpimänä eroteltua seerumia. Verinäyte on säilytettävä +37 °C:ssa kunnes solut ja seerumi on eroteltu toisistaan näytteen hyydyttyä.

**Säilytys ja lähetys** Näytteen tulee olla perillä laboratoriossamme viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä. Lämpimänä eroteltu seerumi säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näyte on suojattava kylmältä kuljetuksen aikana.

**Uusi viitearvo** alle 16 Titteri

**Vastausaika** 6-11 arkipäivää

Muutos koskee 3.1.2022 alkaen vastattavia tuloksia.

### Tutkimuksen lopettaminen ja korvaava tutkimus

**Kryoglobuliini (kval)** (lopetettava tutkimus)  
**S -Kryog-O KL 2157**

Osoitustutkimus kryoglobuliini (kval) lopetetaan. Tilalle tarjotaan tutkimusta:

**Kryoglobuliini** (korvaava tutkimus)  
**S -Kryog KL 3656**

Korvaavassa kryoglobuliinitutkimuksessa positiivisista näytteistä määritetään myös liuenneen presipitaatin määrä (g/l).

**Näyte** 5 ml lämpimänä eroteltua seerumia. Verinäyte on säilytettävä +37 °C:ssa kunnes solut ja seerumi on eroteltu toisistaan näytteen hyydyttyä.

**Asiakastiedote****54/2021****16.12.2021**

Sivu 2(2)

**Säilytys ja lähetys** Näytteen tulee olla perillä laboratoriossamme viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä. Lämpimänä eroteltu seerumi säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näyte on suojattava kylmältä kuljetuksen aikana.

**Vastausaika** 5-12 arkipäivää

S -Kryog (KL 3656) on tilattavissa heti. S -Kryog-O (KL 2157) näytteitä otetaan vastaan viimeisen kerran 28.12.2021.

**Pakettirakennemuutos****Autoimmuunitutkimus****Pt-AIT-L ATK 643****sisältää osatutkimukset**

S -ANA KL 2819

E -Coombm KL 1214

S -KardG ATK 10427

**S -Kryog-O KL 2157****S -Kyhmag KL 2173**

S -RF KL 3550

S -TPOAb KL 4028

**Tutkimukseksi muutetaan S -Kryog, KL 3656****Viitearvo muuttuu, kts. yllä**

**Näyte** 7 ml lämpimänä eroteltua seerumia sekä 3 ml EDTA-verta. Katso tarkemmat ohjeet [laboratoriokäsikirjasta](#).

**Säilytys ja lähetys**

Eroteltu seerumi säilytetään huoneenlämmössä, EDTA-näyte jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Näytteen tulee olla perillä laboratoriossamme viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä.

**Vastausaika** 6-13 arkipäivää

Uusi rakenne otetaan käyttöön 3.1.2022 alkaen

**Tiedustelut**

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi