

Asiakastiedote  
85/2022  
24.8.2022  
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

### Osatutkimus ja päätutkimuksen etuliite vaihtuvat

Tutkimusrakenne 29.8.2022 asti		Uusi tutkimusrakenne 30.8.2022 alkaen	
S -HAE	ATK 527	Pt-HAE	ATK 527
Osatutkimukset		Osatutkimukset	
S -C1Inh	KL 1209	P -C1Inh	ATK 10680
S -C3	KL 2106	S -C3	KL 2106
S -C4	KL 2107	S -C4	KL 2107

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Tiedotimme 19.8.2022 (asiakastiedote 83/2022) muutoksista koskien C1-esteraasin inhibiittori -tutkimusta. Muutokset koskevat myös HAE-pakettitutkimusta. Osatutkimus S -C1Inh (KL 1209) korvataan uudella osatutkimuksella P -C1Inh (ATK 10680) ja päätutkimus on jatkossa Pt-HAE. Muutospäivästä alkaen tutkimusta varten tarvitaan sekä seerumi- että plasmanäytteet. HAE-tutkimuksen muuttuvat tiedot on kirjattu alle:

**Näyteastia** seerumigeeliputki ja Na-sitraattiputki

**Näyte** 2 ml seerumia. Jos seerumi siirretään erotteluputkeen, tarraan on kirjoitettava "seerumi".  
ja  
2 ml Na-sitraattiplasmaa erotteluputkessa, putken tarraan on kirjoitettava "plasma".

### Säilytys ja lähetys

**Seeruminäyte:** säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

**Plasmanäyte:** säilytys ja lähetys pakastettuna.

Lähetä pakastenäyte (plasma) ja seeruminäyte samassa kuljetuksessa laboratorioon.

**Menetelmä** turbidometrinen

**Viitearvot** P -C1Inh: 0.17 - 0.29 g/l. Muut viitearvot säilyvät ennallaan.

Muutokset koskevat niitä näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 30.8.2022 alkaen.

### Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta  
p. 020 734 1550  
ammattilaisneuvonta@synlab.fi