

Arvoisa asiakas,

### Muutoksia kylmänäytteenotto-ohjeistuksessa

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Olemme tarkastelleet näytteenotto-ohjeistuksiamme ja poistamme kylmänäytteenottovaatimuksen alla luetuilta tutkimuksilta.

Tutkimus	KL-numero	Uusi näytteen käsittely- ja lähetysohje
fS-Insu S -Insu	6040 1701	Näytteen annetaan hyytyä huoneenlämmössä. Seerumi erotellaan heti näytteen hyydyttyä ja pakastetaan. Pakastelähetys.
P -ACTH	1020	Plasma erotellaan 15 min kuluessa ja pakastetaan heti erottelun jälkeen. Pakastelähetys.
fS-CT	2008	Näytteen annetaan hyytyä huoneenlämmössä. Seerumi erotellaan heti näytteen hyydyttyä ja pakastetaan. Pakastelähetys.
fS-Gastr	1448	Näytteen annetaan hyytyä huoneenlämmössä. Seerumi erotellaan heti näytteen hyydyttyä ja pakastetaan. Pakastelähetys.
fS-PP	4628	Näytteen annetaan hyytyä huoneenlämmössä. Näyte sentrifugoidaan kylmäsentrifugilla (+4 °C) heti näytteen hyydyttyä. Seerumi erotellaan ja pakastetaan välittömästi. Pakastelähetys.
S -Osteoca	3594	Näytteen annetaan hyytyä huoneenlämmössä. Seerumi erotellaan heti näytteen hyydyttyä ja pakastetaan. Pakastelähetys.
S -TNF	4282	Näytteen annetaan hyytyä huoneenlämmössä. Seerumi erotellaan heti näytteen hyydyttyä ja pakastetaan. Pakastelähetys.

Muutos astuu voimaan heti

### Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta  
p. 020 734 1550  
ammattilaisneuvonta@synlab.fi