

Asiakastiedote

51/2023

5.9.2023

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Näyteohjeistus muuttuu

Metyylihistamiini, virtsasta dU-MHistam KL 3874

Muutos koskee Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Vuorokausivirtsan keräys dU-MHistam-tutkimusta varten voidaan jatkossa toteuttaa ilman säilöntäainetta. Tutkimuksen muut tiedot säilyvät ennallaan.

Näyte

5 ml vuorokausivirtsa (minimi 2 ml). Astia säilytetään jääkaapissa keräyksen ajan. Keräysvirtsa sekoitetaan hyvin ja näyte siirretään puhtaaseen lisäaineettomaan lähetysputkeen.

Huom! Liian laimea virtsa saattaa antaa virheellisen korkean tuloksen, jos virtsan kreatiiniini on hyvin matala.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä enintään 6 tuntia, jääkaapissa 7 vrk ja pakastettuna 1 kk. Lähetys kylmä- tai pakastelähetyksenä.

Säilöntäaineen käytöstä voidaan luopua heti.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi