

Asiakastiedote 3/2024

24.1.2024

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Näyte-, menetelmä- ja tulostasomuutos

Kromograniini A

fS -CgA KL 4504 poistuu käytöstä

fP -CgA KL 6041

Kromograniini A -tutkimuksen menetelmä ja tulosaso muuttuvat. Näytteet mitataan jatkossa entsyymi-immunologisella (ELISA) -menetelmällä. Jatkossa plasmanäytteiden tulosaso on keskimäärin 30 % aiempaa matalampi, mutta viitearvo (normaali: alle 3.0 nmol/l) ei muutu. Viitearvo on validoitu ELISA-kittivalmistajan toimesta. Yksittäisillä potilailla muutos voi olla suurempi tai erisuuntainen. Seurannassa olevan potilaan tulosaso voidaan varmistaa toistomittauksilla.

Jatkossa analysoidaan vain plasmanäytteitä eli seeruminäytteiden analysointi lopetetaan. Kylmänäytteenottoa ja näytteiden pakastamista kolmen tunnin kuluessa näytteenotosta ei enää tarvita. Näytteet säilyvät huoneenlämmössä (18-25 °C) 4 tuntia. Näytteet lähetetään joko 2-8 °C:ssa (säilyvyys 48 tuntia näytteenotosta) tai pakastettuna (-20 °C:ssa).

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 13.3.2024 ja siitä eteenpäin.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelu

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi