

Arvoisa asiakas,

Uudet varmistustutkimukset, jotka liittyvät tutkimukseen

Laaja huumeseulonta (LC-TOFMS), virtsa U -HuumTOF ATK nro 9444

Olemme ottaneet käyttöön uudet varmistustutkimukset haluttujen positiivisten U -HuumTOF löydösten varmistamiseksi.

Positiiviset seulontatulokset on syytä varmistaa ainakin niissä tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta voi seurata testattavalle rikosoikeudellisia tai kurinpidollisia seuraamuksia. Varmistusanalyysit voidaan kohdistaa niihin seulonnassa raportoituihin yhdisteisiin, joilla on tapauksen käsittelyn kannalta merkitystä (esimerkiksi niin, että ei varmisteta henkilön normaaliin lääkitykseen kuuluvia aineita).

Varmistusanalyysit tehdään samasta – jo laboratorioon lähetetystä – näytteestä, josta U -HuumTOF -tutkimuskin on tehty. Varmistusanalyysit tehdään aina massaspektrometrillä menetelmillä.

U -TOFCt1 ATK nro 9567

Yhden yhdisteen ja sen mahdollisten aineenvaihduntatuotteiden varmistusanalyysi.

U -TOFCt2 ATK nro 9568

Kahden eri yhdisteen ja niiden mahdollisten aineenvaihduntatuotteiden varmistusanalyysi.

U -TOFCt3 ATK nro 9569

Kolmen eri yhdisteen ja niiden mahdollisten aineenvaihduntatuotteiden varmistusanalyysi.

U -TOFCt4 ATK nro 9570

Neljän eri yhdisteen ja niiden mahdollisten aineenvaihduntatuotteiden varmistusanalyysi.

U -TOFCt5 ATK nro 9571

Viiden eri yhdisteen ja niiden mahdollisten aineenvaihduntatuotteiden varmistusanalyysi.

Näyte

Tutkimus tehdään samasta – jo laboratorioon lähetetystä – näytteestä, josta U -HuumTOF -tutkimuskin on tehty. Vähintään 20 ml kertavirtsaa (U -HuumTOF seulontaan riittää 5 ml virtsaa. Suurempi määrä tarvitaan, jos näytteestä mahdollisesti halutaan lisätutkimuksena em. varmistusanalyysijä).

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä

Tutkimuspyyntö

Varmistuspyyntö on tehtävä 2 viikon sisällä siitä, kun U -HuumTOF -seulontatulokset on saatu. Varmistuspyynnöt tehdään sähköisellä pyynnöllä ja puhelimitse (puh. 09 5060 5431). Tutkimuspyynnön yhteydessä laboratorioon on ilmoitettava nimeltä ne yhdisteet, jotka halutaan varmistaa.

Menetelmä

Massaspektrometrinen

Tekstiheys

3-5 kertaa viikossa

Vastausaika (arkipäivää)

4-6

Tiedustelut:

kemisti Laura Harju
puh. 043 825 2717
laura.harju@medix.fi

Hintatiedustelut:

asiakasyhteyspäällikkö Anne Knaapila
puh. 050 409 0864
anne.knaapila@medix.fi