

Arvoisa asiakas,

Kylmä-, tasalämpö- ja pakastekuljetuspakkausten käyttö sekä kuljetuskoteloiden tarramerkinnot

Kylmä-, tasalämpö- ja pakastekuljetuspakkaukset:

Pyydämme teitä kiinnittämään erityistä huomiota toimittamiemme kylmä-, tasalämpö- ja pakastekuljetuspakkausten geelien ja kylmävaraajien määrään.

Olemme testanneet pakkausten lämpötilan pysyvyyden kyseisillä kylmäyksiköillä, joten näytteitä lähetettäessä pakkauksissa tulisi olla sama geelien ja varaajien määrä, kuin mitä olemme pakkauksissa teille toimittaneet.

Mikäli teillä on ylimääräisiä geelejä tai varaajia, toivomme teidän palauttavan niitä laboratorioomme.

Kuljetuskoteloiden tarramerkinnot:

Postitse lähetettävissä keltamustaraidallisissa kuljetuskoteloidissa tulee olla Yhtyneet Medix Laboratorion vastauslähetyserkinnot, viivakoodillinen pikatarra ja näytteen tartuntavaarallisuudesta kertovat merkinnot (esim. UN3373, biologinen aine, kategoria B). Perjantailähetyksiin laitetaan lisäksi lauantaijakelutarra.

Tarrojen tulee olla kokonaan näkyvissä joko laatikon etu- tai takapuolella. Ylimääräisten tarrojen ja tarrojen liimaamista toistensa päälle tulee välttää.

Näytteiden lähettämisohjeiden noudattaminen on aina lähettäjän vastuulla.

Lisätietoja näytteiden pakkaamisesta ja lähettämisestä postitse löytyy myös Postin kotisivuilta <https://www.posti.fi/liitteet-yrityksille/ohjeet/laboratorionaytteiden-lahettaminen-ohje.pdf>

Tiedustelut:

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy

Asiakaspalvelu

puh. (09) 52561

asiakaspalvelu@medix.fi