

Arvoisa asiakas,

Otamme valikoimaan uuden Golimumabin pitoisuus- ja vasta-ainepaketin. Lisäksi S -GolimAb viitearvot muuttuvat.

Golimumabi, pitoisuus- ja vasta-aine-paketti
S -GolimPa ATK 10417

Osatutkimukset (tilattavissa myös erikseen)

S -Golim ATK 9434
S -GolimAb ATK 9435

S -GolimPa:

Tutkimusvalikoimamme on laajentunut golimumabin pitoisuus- ja vasta-ainepaketilla. Tutkimuspaketissa määritetään ensin golimumabin pitoisuus. Pitoisuuden ollessa 0,5 µg/ml tai sen alle määritetään näytteestä myös lääkevasta-aineet golimumabia vastaan. Jos jäännöspitoisuus on yli 0,5 µg/ml, ei lääkevasta-aineita tutkita. Huomioitthän, että olemme samassa yhteydessä päivittäneet S -GolimAb viitearvon.

S -GolimAb viitearvo:

Uusi viitearvo on alle 45 AU/ml ja se on voimassa heti.

Indikaatiot Päätöksenteon tueksi annostelun tai annosteluvälin muutosharkinnan yhteydessä, oheislääkityksen muutosharkinnan yhteydessä tai lääkevaihtopäätökseen liittyen, esimerkiksi epäiltäessä puutteellista tehoa tai tehon hiipumista.

Näyte 1-2 ml seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Näyte tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus).

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä Pitoisuusmääritys: EIA
Lääkevasta-ainemääritys: RIA

Tekotiheys 1-2 viikon välein

Vastausaika 10-15 arkipäivää

Erittäin suurten ja pienten pitoisuuksien vastaaminen voi kestää kauemmin.

Tulkinta Tuloksista annetaan lausunto.

Tiedustelut:

Johtava ylilääkäri
Sakari Jokiranta
puh. 050 547 1184
sakari.jokiranta@medix.fi

Hintatiedustelut:

markkinointi@medix.fi

Tietohallinto:

järjestelmäasiantuntija Maria Leppänen
puh. 043 825 9315
maria.leppanen@medix.fi