

Asiakastiedote

69/2025

4.11.2025

Sivu 1(2)

Arvoisa asiakas,

1. Muutos näytemäärään

Kryoglobuliini

S -Kryog

KL 3656

Seerumin määrä ja inkubaatioaika vaikuttavat kryoglobuliinitutkimuksen herkkyyteen. Herkkyyden parantamiseksi tutkimukseen vaaditaan jatkossa isompi näytemäärä, 10 ml seerumia.

Näyteastia Seerumiputki 3 x 10 ml tai seerumiputki 6 x 5 ml. Geeliputki ei sovellu näytteenottoon.

Näyte 10 ml seerumia.

Putki voi olla esilämmitetty tai huoneenlämpöinen. Kokoveri on säilytettävä +37 °C:ssa, kunnes seerumi on eroteltu. Sentrifugointi +37 °C:ssa. Mikäli näyte pääsee jäähtymään ennen kuin seerumi on eroteltu, ei tutkimusta voida tehdä. Erotteluputket tulee sitoa yhteen kumilenkillä tai pakata samaan minigrip-pussiin. Kokoverenä saapuvat näytteet hylätään.

2. Kysyttävien lisätietojen lisääminen

Lisäämme seuraaville tutkimuksille kysyttävät lisätiedot. Lisätietokysymys tulee lisätä käytössä olevaan tietojärjestelmään. Lisätietokysymysten tulee olla tutkimuksilla käytössä 1.12.2025 alkaen.

KL/ATK	Tutkimus	Kysyttävä lisätieto	
4437	-TbEVi	Näytteen laatu	Pakollinen lisätieto
2812	-TbVi	Näytteen laatu	Pakollinen lisätieto
4381	-BaktNhO	Näytteen laatu	Pakollinen lisätieto
4490	-TbNhO	Näytteen laatu	Pakollinen lisätieto
11022 STT-koodi: 9061	-ListNhO	Näytteen laatu	Pakollinen lisätieto
2257	-ListVi	Todellinen ottoaika	
		Näytteen laatu	Pakollinen lisätieto
		Mistä otettu	Pakollinen lisätieto

Asiakastiedote
69/2025
4.11.2025
Sivu 2(2)

3. Listeriaviljelyä ei jatkossa tehdä ulostenäytteistä

Listeria, viljely
-ListVi KL 2257

Alihankintalaboratoriomme lopettaa listeriaviljelyt ulostenäytteistä. **Listeriaviljely on edelleen tilattavissa muista näytelaaduista.**

Syynä on -ListVi -tutkimuksen puutteellinen herkkyys ulostenäytteille. Tutkimuksella ei voida luotettavasti poissulkea mahdollista listeria-altistumista eikä ulostenäytteiden tutkiminen sovellu listerian aiheuttamien infektioiden diagnostiikkaan. Ulostenäytteitä otetaan viimeisen kerran vastaan 8.11.2025.

4. Valikoimasta poistuvia tutkimuksia

Japanin enkefaliittivirus, vasta-aineet
S -JPEAb KL 4318

Tutkimus poistuu valikoimasta vähäisen kysynnän vuoksi 31.12.2025. Kliinisesti perustelluissa tilanteissa tutkimus on jatkossa saatavilla nimikkeellä S -ZoonVAb (ATK 20679). Tällöin tutkivaan laboratorioon on aina oltava yhteydessä puhelimitse ennen näytteen ottamista ja tutkimuksen tilaamista. Näin voidaan varmistaa, että pyyntö on mahdollista toteuttaa laboratoriossa ylläpidetyillä menetelmillä.

K1-Vitamiini (Fyllokinoni)
fP-K1-Vit ATK 9251

Yksittäin tilattava K1-vitamiinitutkimus poistuu valikoimasta 31.12.2025. Valikoimastamme löytyy fP-K-VitPa (ATK 10452), johon K1-vitamiini kuuluu edelleen osatutkimuksena.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut
Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi