

Asiakastiedote**70/2025****5.11.2025**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,**Näyteohjeen päivitys B -Diffi-tutkimukselle****Leukosyytit, erittelylaskenta
B -Diffi KL 2225**

Olemme päivittäneet ohjekirjaan B -Diffi-tutkimuksen näytteenottoon ja -käsittelyyn liittyviä ohjeita sekä lisänneet tärkeää tietoa leukosyyttien erittelylaskentaan liittyvästä analysoinnista.

Jatkossa pyydämme, että kaikkien tutkimusten, jotka perustuvat leukosyyttien erittelylaskentaan (esimerkiksi B -EOS, B -Neut) mukana toimitetaan tuoreesta näytteestä vedetty sivelyvalmiste, jos näyte ei saavu analysoitavaksi samana päivänä

Lisäksi ohjekirjaan on lisätty seuraavat tiedot:

Huomioitavaa:

Näytteet, jotka ovat alle 2 vuorokauden ikäisiä, analysoidaan normaalisti laitteella.

Mikäli laite epäilee tulosten luotettavuutta, näyte mikroskopoidaan aina, riippumatta näytteen iästä.

Jos mikroskopoinnin ja analysaattorin tulokset poikkeavat merkittävästi toisistaan ja jos vastaukseksi annetaan mikroskopoinnin tulos, tästä lisätään erillinen lausunto. Yleensä analysaattorin tulokset ovat lähtökohtaisesti luotettavampia kuin manuaalidiffi, koska otanta on suurempi ja leukosyyttien suhteet tarkemmin arvioitavissa. Tästä syystä, vaikka pyyntönä olisi vain B-Diffi, tulee lasin lisäksi aina lähettää näytteeksi myös EDTA-putki. Putki lähetetään samalla pyynnöllä, ja se voi olla sama putki, josta on näytteenottopisteessä tehty B -PVK-tutkimus.

Erityistilanne: pienet lapset

Kun näyte otetaan pienestä lapsesta, on suositeltavaa tehdä sivelyvalmiste heti näytteenoton yhteydessä, vaikka näyte saapuisi laboratorioon saman päivän aikana.

Tämä parantaa tulosten luotettavuutta, sillä lasten näytteissä solujen morfologia ja säilyvyys voivat muuttua herkemmin, mikä vaikuttaa analyysin tarkkuuteen.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi