

Asiakastiedote

79/2025

3.12.2025

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

1. Näyteohjeistusmuutos

B5-vitamiini (pantoteenihappo)

S -B5-Vit ATK 9097

Päivitämme näytteen käsittelyyn liittyvän ohjeistuksen. Tutkimuksen muut tiedot säilyvät ennallaan.

Näyte 1 ml seerumia. Näyte suojataan valolta. Seerumi erotellaan heti näytteen hyydyttyä ja pakastetaan välittömästi.

Säilytys ja lähetys Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna sekä valolta suojattuna. Säilyvyys pakastettuna 3 kk.

Sykloseriini

P -Cyclos ATK 11097

Säilytys ja lähetys Eroteltu plasma pakastetaan sentrifugoinnin jälkeen ja lähetetään pakastettuna.

Muutokset astuvat voimaan heti.

2. Kysyttäviä lisätietoja päivitetään

Alla mainitut kysyttävät lisätiedot muutetaan pakollisiksi. Lisätietokysymykset tulee lisätä käytössä olevaan tietojärjestelmään 5.1.2026 mennessä.

KL/ATK	Tutkimus	Pakollinen lisätieto
9375 (STT 11086)	-Imm-Ong	Mikä tutkimus Näytteen laatu
1564 (STT 11150) 6600	B -Hb-Fr B -Hb-Ef	Esitiedot Viimeisin PVK Kysymyksen asettelu
4770 407	B -FISHDel -Krom+FISH	Mikä deleetio

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi