

Asiakastiedote**23/2026****27.3.2026**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Muutos näytteen käsittelyyn**Gastropaneli****fP-GastPan KL 9225 STT 9172****Mahalaukun biomerkkiainetutkimus****fP-Mabi-La ATK 20609**

Reagenssivalmistaja on muuttanut näytteen käsittelyn ohjeistusta tutkimuksissa fP-GastPan ja fP-Mabi-La. Jatkossa Gastrin-17-stabilaattorin lisääminen näytteeseen on pakollista, jotta varmistutaan Gastrin-17-tason säilymisestä näytteen analysointiin saakka.

Näytteitä voidaan ottaa vain niissä näytteenottopisteissä, joissa stabilaattoria on saatavilla. Stabilaattoria REF 606051 voi tilata SYNLABin tarviketilauksista, mistä se löytyy nimellä Gastriini-17-stabilaattori. Vastaava tuote REF601051 on yhä käytettävissä viimeiseen käyttöpäivään saakka.

HUOM! Yksi tippapullo tuotetta riittää noin 20 näytteelle, joten sitä ei ole tarvetta tilata useampaa varastoon. Stabilaattoria tulee tilata vain niihin näytteenottopisteisiin, joissa fP-GastPan ja fP-Mabi-La näytteitä otetaan.

Näytteen käsittely ja säilyvyys

Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen (kuitenkin viimeistään 2 tunnin kuluessa näytteenotosta). Gastrin-17-stabilaattoria lisätään 100 µl (4 tippaa) / 2 ml plasmaa välittömästi erottamisen jälkeen ja sekoitetaan kääntelemällä putkea. Stabilaattorin lisäämisen jälkeen näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Selvästi hemolyyttinen, lipeeminen tai samea näyte ei kelpaa määrittelyyn.

Tutkimuksen muihin tietoihin ei tule muutoksia.

Suosittellemme ottamaan stabilaattorin käyttöön mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 24.4.2026 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi