

Asiakastiedote

45/2026

21.7.2026

Sivu 1(2)

Arvoisa asiakas,

1. Viitearvomuutos

B6-vitamiini (Pyridoksaalifosfaatti)

fP-B6-Vit KL 6080

Päivitämme fP-B6-Vit tutkimuksen viitearvot vastaamaan alihankintatekopaikan viitearvoja.

Viitearvot	Uudet viitearvot	Vanhat viitearvot
	20–121 nmol/l	20–120 nmol/l

fP-B6-Vit viitearvomuutos koskee 22.10.2026 alkaen vastattavia näytteitä.

2. Viitearvomuutos

Itrakonatsoli

S -Itrakon KL 6163

Osatutkimus

S -OHltrak ATK 10338 Hydroksi-itakonatsoli

Muutamme viitearvot alihankintatekopaikan mukaisesti jäännöspitoisuuteen. Viitearvot ilmoitetaan jatkossa vastauksen lausunnossa. Näytteenoton ajoitukseen liittyvä ohjeistus muuttuu samalla vastaamaan jäännöspitoisuuden mittaamista.

Viitearvot	Tutkimus	Viitearvo (cmin)
	S -Itrakon	Terapeuttinen alue: 1–4 mg/l Profylaksian tavoitealue: 0.5–4 mg/l
	S -OHltrak	Pitoisuus on tyypillisesti noin 1–2-kertainen verrattuna itrakonatsolin pitoisuuteen

Näyte 0.5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte jäännöspitoisuuden (Cmin) mittaamiseksi otetaan juuri ennen (alle 30 minuuttia ennen) seuraavaa lääkeannosta. Näyte tulisi ottaa aikaisintaan 15 vuorokauden kuluttua lääkehoidon aloittamisesta, mikäli käytössä ei ole ollut latausannosta (loading dose). Mikäli hoito on aloitettu latausannoksella, näyte tulisi ottaa aikaisintaan ensimmäisen ylläpitoannoksen jälkeen.

Asiakastiedote**45/2026****21.7.2026**

Sivu 2(2)

S -litrakon muutokset koskevat 22.9.2026 alkaen vastattavia näytteitä.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi