

Asiakastiedote

13/2020

21.2.2020

Sivu 1/2

Arvoisa asiakas,**Viivettä HPVnhO-tutkimuksen näytteenottovälineiden toimituksessa****Koskee tutkimuksia**

-hHPVnhO **KL 6445**
-HPVPapa **ATK 9929**
-HPVseul **KL6446**

Ihmisen papilloomavirus (human papilloma virus, HPV) tutkimuksen näytteenottovälineiden valmistuksessa ja toimituksessa asiakkaille on lisääntyneen kysynnän vuoksi tällä hetkellä viivettä. Kyseessä on *Aptima Cervical Specimen Collection and Transport Kit* ja lähetämme näitä näytteenottovälineitä asiakkaillemme tilausten saapumisjärjestyksessä välittömästi niiden saapuessa varastoomme.

Aptima Cervical Specimen Collection and Transport Kit -näytteenottovälineiden toimituskatkon ajan pystymme tarjoamaan teille tutkimuksen vaihtoehtoisella menetelmällä, ks. tämän tiedotteen 2. sivu. Vaihtoehtoiseen tutkimukseen sopiva näytteenottoväline on *Copan FLOQSwab*. Voitte tilata näitä näytteenottovälineitä ammattilaisneuvonnan kautta.

Pahoittelemme tästä meistä riippumattomasta toimitusviiveestä.

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta

puh. 09 52 561

asiakaspalvelu@medix.fi

Asiakastiedote

13/2020

21.2.2020

Sivu 2/2

Vaihtoehtoinen tutkimus: Papilloomavirus, nukleiinihappo, kval (HPVNhO)**Koskee tutkimuksia**

-hHPVNhO	KL 6445
-HPVPapa	ATK 9929
-HPVseul	KL6446

Näyte ja näytteenotto-ohje

Kohdunkaulan limakalvonäyte. Näyte otetaan ennen mahdollisia penslauksia. Ylimääräinen lima poistetaan vanutikulla. Näyte otetaan työntämällä Copanin näytteenottotikku kohdunkaulakanavaan n. 2 cm syvyyteen. Tikkuu pyöritetään kanavassa riittävän näytemäärän varmistamiseksi. Näytteenoton jälkeen tikku siirretään kuljetusputkeen. Tikkuu ei pidä katkaista, koska tikun pää toimii kuljetusputken korkkina.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy analyysikelpoisena jääkaappilämpötilassa 7 vuorokautta. Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli näyte saapuu laboratorioon 24 h sisällä. Muussa tapauksessa tarvitaan kylmälähetys. Näytteenottovälineitä voi tilata soittamalla ammattilaisneuvontaan (puh. 09 52 561). Kylmälähetykseen käytetään tuotetta ”Kuljetuskotelosetti tasalämpölähetyksille, bakt. viljelyt (sis. styroxxkotelo, 2 kylmägeeliä)”.

Yhdistelmä tutkimusten osalta gynekologisen irtosolututkimuksen näytteenotto-ohjeeseen ei tule muita muutoksia kuin yllä mainittu. Kiinnittäkää näytteenottovälineen mukana tullut tarra Papalaskoteloon. Papalaskotelot lähetetään huoneenlämmössä.

Menetelmä

PCR, genotyypitys. HPVnho-testi tunnistaa suuren riskin papilloomavirusgenotyypit 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 82 eli nykyisin käytössä olevan menetelmän suuren riskin genotyyppien lisäksi erittäin harvinaiset genotyypit 53 ja 68.

Teksti

2 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

-hHPVNhO (KL 6445): 3-5
-HPVPapa (ATK 9929): 3-8
-HPVseul (KL6446): 3-5

Ei muutoksia tulosten viitearvoon tai tulkintaan. Mikäli suuren riskin genotyypit 53 tai 68 löytyvät näytteestä, kommentoidaan se erikseen.

Tekopaikka

SYNLAB Tallinna

Akkreditointitaho: EAK (EA MLA:n jäsen), Standardi: EVS-EN ISO 15189