

Asiakastiedote**45/2025****17.6.2025**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Hematologian kokoverinäytteiden pakkaaminen ja lähettäminen kesäaikana

Pyydämme, että kiinnitätte erityistä huomiota hematologian kokoverinäytteiden (EDTA -putki) pakkaamiseen ja lähettämiseen lämpimien säiden aikana.

Jos verinäyte altistuu liialliselle lämpötilalle ennen analysointia, punasolut voivat turvota, mikä voi johtaa virheellisesti kohonneeseen MCV-arvoon. Samalla punasolujen tilavuudesta riippuvat muut arvot muuttuvat: hematokriitti (Hkr) voi nousta ja MCHC laskea, mikä vaikuttaa tulosten luotettavuuteen.

Lisätietoja näytteiden säilytyksestä ja lähetyksestä löydät osoitteesta:

<https://www.yml.fi/laboratoriokasikirja/files/1103.pdf>

Foliota voi tarvittaessa tilata tarviketilaussivustolta kommenttikentästä.

Näytelaukkuihin on pakattu ylimääräisiä kylmägeelejä, joita tulee käyttää kesän ajan. Geelit tulee laittaa laukkuun jääkaappikylmänä. Pyydämme huomioimaan, että yön yli kestävässä kuljetuksissa laukkuun tulee laittaa useampi kylmägeeli, jotta näytelaukun sisälämpötila pysyy optimaalisessa tilassa. Lyhyemmissä kuljetuksissa riittää matkan pituudesta riippuen 1–2 kylmägeeliä.

Oikeaoppinen säilytys ja kuljetus ovat ratkaisevia osa-alueita luotettavien laboratoriotulosten varmistamisessa.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi