

## B -NIPTdel (KL 6374) – NÄYTTEENOTTO-OHJE

Tutkimusta varten tarvitaan 10 ml veriputki, joka on tarkoitettu soluvapaan DNA:n keräämiseen kokoverestä (Cell-free DNA BCT® CE, maastokuvioinen korkki). Putkia tilataan kotisivuiltamme <http://www.yml.fi> Tarviketilaukset -välilehdeltä.




### Ennen näytteenottoa

NIPTdel -näytteitä voidaan ottaa vain alkuviikosta ma-ke. Keskiviikkona otettujen näytteiden tulee olla laboratoriossamme viimeistään torstaina klo 12.

Ennen näytteenottoa potilaalle annetaan luettavaksi B -NIPTdel -potilasinfo ja annetaan muutoinkin tarvittava tieto tutkimuksesta. Samalla täytetään B -NIPTdel-tutkimuslähete kaikilta osin. Huomioi, että kaikki kysytyt tiedot ovat tärkeitä tutkimuksen onnistumiseksi. Lisäksi on erittäin tärkeää, että potilas allekirjoittaa NIPTdel-tutkimuslähetteen, sillä ilman allekirjoitusta tutkimusta ei voida tehdä.

### NÄYTTEENOTTO

- 1) Laita henkilötunnistetarra putkeen.
- 2) Ota putki täyteen näytettä (näytettä on oltava vähintään 7 ml yhdessä putkessa).
- 3) Sekoita näyte välittömästi näytteenoton jälkeen kääntelemällä putkea 8-10 kertaa. Näytteen kunnollinen sekoittuminen on tärkeää sen säilyvyyden kannalta.

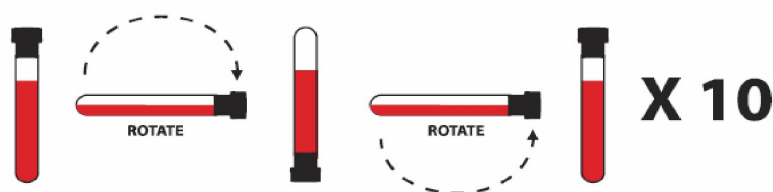

- 4) Näyte säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä. Näyte EI SAA jäätyä!
- 5) Lähetä näyte ja **potilaan allekirjoittama** NIPTdel -tutkimuslähete välittömästi näytteenoton jälkeen YML:n laboratorioon. **Huomioi, että näytteen tulee olla perillä näytteenottoa seuraavana päivänä, torstaisin viimeistään klo 12.**