

## Verinäytteiden pakkaaminen kesähelteillä

Kun lämpötila nousee yli +25°C-asteen (muulloin lähetys huoneenlämpö- tai kylmälähetys ohjeistuksen mukaisesti: [www.yml.fi](http://www.yml.fi)), pakkaa näytteet, jotka eivät saa lämmettä (esim. PVK- ja TVK-näytteet) seuraavasti:



1. Pakkausmateriaalit: 1 jäinen geelipussi, 2 kpl imuliinoja, folio, iso Minigrip-pussi, pieni Minigrip-pussi / 5 näytettä, tasalämpöpakkaus (styrox + pahvilaatikko)



2. Kääri pienessä Minigrip-pussissa olevat näytteet (5 kpl) **kahteen** imuliinaan. Näytteet eivät saa olla suorassa kosketuksessa jäisen geelipussin kanssa.



3. Pakkaa imuliinoihin kääritty Minigrip-pussi näytteineen jäisen geelipussin kanssa folioon. Folion käyttö edesauttaa lämpötilan säilymistä viileänä.



4. Aseta tiiviiksi kääritty foliopakkaus isoon Minigrip-pussiin.



5. Kääri Minigrip-pussi tiiviiksi pakkaukseksi ja aseta se styrox-koteloon. Sulje kotelo ja teippaa tiiviiksi.



6. Laita styrox-kotelo pahvilaatikkoon. Sulje pahvilaatikko.