

B -NIPTdel (KL 6374) – NÄYTTEENOTTO-OHJE

Tutkimusta varten tarvitaan 10 ml veriputki, joka on tarkoitettu soluvapaan DNA:n keräämiseen kokoverestä (Cell-free DNA BCT® CE, maastokuvioinen korkki). Putkia voi tilata kotisivuiltamme kohdasta "Tarviketilaukset".




Ennen näytteenottoa

NIPTdel -näytteitä voidaan ottaa vain alkuviikosta ma-ke. Keskiviikkona otettujen näytteiden tulee olla laboratoriossamme viimeistään torstaina klo 12.

Ennen näytteenottoa tutkittavalle annetaan luettavaksi B -NIPTdel -potilasinformaatio ja annetaan muutoinkin tarvittava tieto tutkimuksesta. Samalla täytetään B -NIPTdel-tutkimuslähete (test request and patient consent form) vähintään pakolliseksi merkittyjen tietojen osalta. Huomioi, että kaikki kysytyt tiedot ovat tärkeitä tutkimuksen onnistumiseksi. **Lisäksi on erittäin tärkeää, että tutkittava allekirjoittaa tutkimuslähetteen MOLEMMAT sivut.** Ilman allekirjoituksia tutkimusta ei voida tehdä. Vaillinaisesti täytetty lomake saattaa johtaa analysoinnin viivästymiseen tai jopa näytteen hylkäämiseen.

NÄYTTEENOTTO

- 1) Laita henkilötunnistetarra putkeen.
- 2) Ota putki täyteen näytettä (näytettä on oltava vähintään 7 ml yhdessä putkessa).
- 3) Sekoita näyte välittömästi näytteenoton jälkeen kääntelemällä putkea 8-10 kertaa. Näytteen kunnollinen sekoittuminen on tärkeää sen säilyvyyden kannalta.

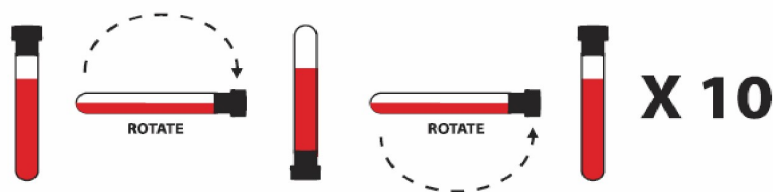

- 4) Näyte säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä. Näyte EI SAA jäätyä!
- 5) Lähetä näyte ja tutkimuslähetteen (test request and patient consent form) **molemmat sivut allekirjoitettuna** välittömästi näytteenoton jälkeen SYNLABin laboratorioon. Huomioi, että näytteen tulee olla perillä SYNLABin laboratoriossa viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä, torstaisin viimeistään klo 12.