

## BAKTERIER, ODLING, SPUTUM

Ex-BaktVi (1331)

Utredning av orsaken till bakterieinfektion i de nedre luftvägarna. Ur provet undersöks närmast förekomsten av pneumokocker, haemophilus och Moraxella catarrhalis.

### Provtagningsmaterial

- Provtagningsburk, torr/med skruvlock
- Namnetikett
- Plastpåse (t.ex. Minigrip®)

### Provtagning

En effektiv och djup hostning är viktig för att det skall finnas tillräckligt med material för undersökningen. Slemlösande hostmedicin är till hjälp för att få ett bra upphostningsprov.

- Mun och svalg sköljs med vatten innan upphostning. Morgonupphostning hostas direkt in i öppen burk. Det bör finnas rikligt med upphostningsmaterial. Spott eller utsöndring från näs och svalg duger inte till provmaterial.
- Provtagningsburken försluts omsorgsfullt.
- Namnetikett från laboratoriet, eller en själv ifylld namnetikett, fästs på provtagningsburkarna. Etiketten ska innehålla uppgifter om namn, personbeteckning och provtagningsdatum.
- Efter provtagningen placeras provtagningsburken i en plastpåse som försluts omsorgsfullt.

### Förvaring och transport

Provet förvaras i kylskåp efter provtagningen (2-8°C). Provet levereras till laboratoriet som kylförsändning så fort som möjligt under provtagningsdagen.