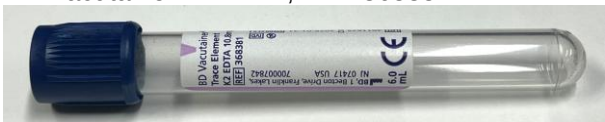


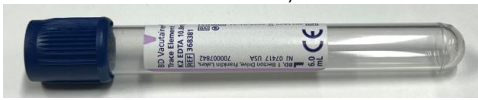
HIVENAINE- JA ALTISTETUTKIMUSTEN NÄYTEASTIAT JA KULJETUSPUTKET

Tutkimusten muut tiedot, kuten ohjeet näytteenoton ajoittamisesta sekä näytteiden säilytys- ja lähetysohjeet, tulee aina lukea laboratoriokäsikirjastamme.

Kokoverestä tehtävät tutkimukset:

Nro	Lyhenne	Näytteenottoputki
2636	B -Zn	
2147	B -Cr	
6164	B -Co	
1314	B -Hg	
1988	B -Cd	
2271	B -Pb	
3748	B -Mn	
9380	B -CrCo	
6166	B -Ti	

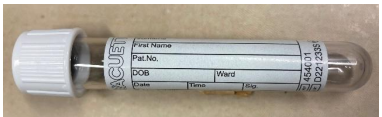
Plasmasta tehtävät tutkimukset:

Nro	Lyhenne	Näytteenottoputki	Erotteluputki
4564	P -Se		

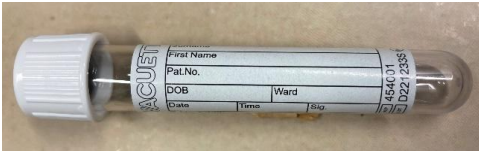
Seerumista tehtävä tutkimus:

Nro	Lyhenne	Näytteenottoputki	Erotteluputki	Huomioitavaa
11088	S -Zn	Seerumigeeliputki esim. BD Vacutainer REF 367957 tai Vacuette REF 454078		Seerumi on eroteltava geelin päältä heti sentrifugoinnin jälkeen.
2170	S -Cu			
2998, 10015	S -Al	Vacuette Z No Additive, REF 454001		Yksilöllinen hyttymisaika, erottelu 4h kuluessa. Seerumi kaadetaan erotteluputkeen.

Vuorokausivirtsasta tehtävät tutkimukset:

Nro	Lyhenne	Näyteastia	Kuljetusputki	Huomioitavaa
2169	dU-Cu	Tehdaspuhdas keräysastia		Näyte siirretään kaatamalla kuljetusputkeen
2637	dU-Zn	Tehdaspuhdas keräysastia. Astiassa tai sen korkissa ei saa olla kumista valmistettuja osia (esim. korkintiiviste).		

Virtsasta tehtävät tutkimukset:

Nro	Lyhenne	Näytteenottoastia	Kuljetusputki	Huomioitavaa
1316	U -Hg	Tehdaspuhdas muovipurkki.	Vacuette Z No Additive, REF 454001 	Näyte siirretään kaatamalla kuljetusputkeen
1984	U -I			
1989	U -Cd			
2149	U -Cr			
2171	U -Cu			
2274	U -Pb			
2323	U -Mn			
2397	U -Ni			
3456	U -Co			
3921	U -Al			
1761	U -MaPGa	Tehdaspuhdas muovipurkki.	Säilöntäaineeton kuljetusputki (biomonitorointi): 	Näyte siirretään välittömästi kaatamalla kuljetusputkeen. Lähetä näytteen mukana täytetty esitietolomake .
1776	U -Pyr			
3977	U -Naftol			
1777	U -Zn			
1734	U -As-I			
3229	U -Methipp			
1766	U -MDA	Tehdaspuhdas muovipurkki.	Säilöntäainetta (sitruunahappo) sisältävä kuljetusputki: 	
9459	U -MeOH	Tehdaspuhdas muovipurkki.	Teflonkorkkinen lasiputki: 	