

PARASIITIT, NUKLEIINIHAPPO, ULOSTE

F -ParaNhO (6375)

F –ParaNhO tutkimuksen tarkoituksena on vatsavaivojen ja ripulin syyn selvittäminen erityisesti ulkomaanmatkojen jälkeen. Tutkimus löytää suoliston alkueläinparasiitit *Giardia lamblia*, *Dientamoeba fragilis*, *Cryptosporidium spp.*, *Entamoeba histolytica*, *Cyclospora cayetanensis* ja *Blastocystis hominis* myös Suomessa.

Näytteenottovälineet

- Laaja näytteenottopurkki tai kaarimalja
- Nimitarra
- Muovinen pussi (esim. Minigrip)
- Fecalswab® näyteputki ja näytteenottotikku



Näytteenotto

- Ulostetaan laajaan kertakäyttöiseen astiaan tai WC-paperiin. Ulostesta otetaan näyte välittömästi ulostamisen jälkeen. Verinen ripuliuloste ei kelpaa näytteeksi.
- Avataan Fecalswab® -näytteenottopakkaus.
- Avataan pakkauksessa oleva Fecalswab® -näyteputken vihreä korkki ja asetetaan putki pystyasentoon tasaiselle alustalle.
- Otetaan pakkauksesta näytteenottotikku ja pyöritetään tikkua ulosteessa niin, että tikkuun tarttuu sopiva määrä ulostetta.



Sopiva määrä ulostetta



Liikaa ulostetta

- Työnnetään ulosteinen näytteenottotikku näyteputkeen ja sekoitetaan niin, että uloste liukenee putkessa olevaan säilytysnesteeseen.
- Heitetään näytteenottotikku pois esim. sekajätteeseen ja suljetaan näyteputki huolellisesti vihreällä korkilla.
- Kiinnitetään laboratoriosta saatu tai itse täytetty nimitarra näyteputkeen. Tarrassa täytyy olla nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.
- Näytteenoton jälkeen kuljetusputki pakataan muovipussiin, joka suljetaan huolellisesti.

Säilytys ja kuljetus

Näyteputki on tuotava laboratorioon mahdollisimman pian, mieluiten jo näytteenottopäivänä. Näytteen säilyvyysaika on 3 vrk jääkaapissa (2-8°C).