

BAKTERIER, ODLING OCH NUKLEINSYRA, AVFÖRING**F -BaktVIP (21088)**

Ur avföringsprovet undersöks med både genkopieringstest och med odling den bakteriella orsaken till diarré. Undersökningen omfattar bakterier som orsakar turistdiarré.

Provtagningsmaterial

- Stor provtagningsburk eller rondsål
- Namnetiket
- Plastpåse (t.ex. Minigrip®)
- Fecalswab® provrör och sticka för provtagning

**Provtagning**

- Tarmen töms i ett stort engångskärl eller i WC-papper. Provet tas från avföringen strax efter att tarmen tömts.
- Fecalswab® -provtagningsförpackningen öppnas.
- Fecalswab® -provrörets gröna kork öppnas och röret placeras vertikalt på ett jämt underlag.
- Bomullsstickan roteras i avföringen så att en passlig mängd avföring fastnar på stickan.

**Passlig mängd avföring****För mycket avföring**

- Stickan för provtagning sätts in i provröret varefter man blandar om så att avföringen löses upp i vätskan.
- Stickan för provtagning kastas bort, t.ex. i blandavfall. Provröret stängs omsorgsfullt med den gröna korken.

OBS! I de bildförsedda instruktionerna i provtagningsförpackningen rekommenderas att stickan lämnas avbruten i provröret.

I DENNA UNDERSÖKNING FÅR STICKAN INTE LÄMNAS I

Fäst namnetiketten från laboratoriet, eller en själv ifylld namnetikett, på transportrören. Etiketten ska innehålla uppgifter om namn, personbeteckning och provtagningsdatum.

Efter provtagningen placeras transportrören i en plastpåse som försluts omsorgsfullt.

Förvaring och transport

Provrören förvaras i kylskåp efter provtagningen (2-8°C).

Provet levereras till laboratoriet i rumstemperatur snarast möjligt, under provtagningsdagen. Om transporten tar lång tid rekommenderas kyltransport. Bakterieodlingsprover tål inte nedfrysning och om temperaturen stiger över rumstemperatur försämras provens hållbarhetstid betydligt.

Till laboratoriet anmäls ort för möjlig utlandsresa.