

ULOSTEEN VERI F -hHb-O

Tutkimuksen tarkoitus

Ruoansulatuskanavassa tapahtuvan verenvuodon osoittaminen

Tutkimukseen valmistautuminen

Näytteet otetaan Actim™ Fecal Blood- näytteenlaimennosputkiin (1-3 kpl). Suositellaan kolmen erillisen näytteen ottoa eri ulostamiskerroilla. Testi ei vaadi erityisruokavaliota. Näytettä ei voi ottaa kuukautisten aikana

Näytteenotto

- Ulostenäytettä otetaan wc-paperiin tai puhtaaseen astiaan (esim. kertakäyttöpurkki).
- Näytteenlaimennosputki avataan ja otetaan näytettä korkkiin kiinnitetyllä tikulla pyörittäen tikkua ulostenäytteen eri kohdissa siten, että tikun molemmilla puolilla oleviin loviin jää ulostetta (kuva 1).
- Ylimääräinen uloste poistetaan esim. pyyhkimällä tikkua wc-paperilla. Näytteen määrä on riittävä, kun molemmat lovet sisältävät ulostetta. Liian suuri ulostemäärä haittaa testin suoritusta (kuva 2).
- Näytteenottotikku siirretään näytelaimennos putkeen ja kierretään korkki kiinni. Putkea ravistellaan huolellisesti, jotta näyte sekoittuu nesteeseen (kuva 3).
- Putken kylkeen kiinnitetään tarra, johon on merkitty nimi, henkilötunnus, näytteenotto päivämäärä- ja kellonaika.

Näytteen säilytys ja kuljetus

- Näyte säilyy näytteenlaimennosputkessa 7 vrk jääkaapissa (2-8°C) tai huoneenlämmössä valolta suojattuna.
- Kuljetus huoneenlämmössä.
- Näyte toimitetaan laboratorioon.

