

## Ohje pienen kudoksenäytteen mittaamisesta ja tutkimuksen valinnasta

17.6.2026  
Sivu 1 / 1

### Pienen kudoksenäytteen mittaaminen ja tutkimuksen valinta

Ennen tutkimuksen valintaa kudoksenäyte tulee mitata huolellisesti, jotta valinta perustuu oikeaan näytekokoon. Mittausohje koskee pientä kudospalaa, esimerkiksi ihopalat, lipoomat, muut pienet kudokappaleet.

Toimi seuraavasti:

- Käytä mittaamiseen sopivaa välinettä, kuten muovista viivoitinta, rullamittaa, työntömittaa tai vastaavaa.
- Mittaa kudospalan pisin pituus, mukaan lukien ihonalaiskudos – älä rajoitu pelkästään muutosalueeseen.
- Aseta kudospala suoraksi alustalle. Vältä kudoksen venyttämistä tai puristamista.
- Paina mittaväline kevyesti kudosta vasten saadaksesi tarkan mittatuloksen.



Valitse tutkimus seuraavien kriteerien mukaan:

**Ts-PAD-1** — jos kudospala on  $< 2$  cm

**Ts-PAD-3** — jos kudospala on  $\geq 2$  cm

**Ts- PAD-3** — jos näytteessä on **merkkilanka**

**Ts- PAD-3** — **muutos, ei ihottuma** - jos lähettävä lääkäri ilmoittaa lähetteessä, että näyte tulee ohjata *ihopatologille*.

**Sk-PADIhot** — jos kyseessä on **ihottumanäyte**