

ELASTAASI 1, ULOSTE

F -Elast1 (1718)

Haiman vajaatoiminnan selvittäminen

Näytteenottovälineet

- Kaarimalja tai muu laaja kertakäyttöastia
- Ulostepurkki, kuiva/kierrekorkillinen
- Kertakäyttöinen näyteastia
- Nimitarra
- Muovipussi (esim. Minigrip®)

Näytteenotto

- Ulostetaan kertakäyttöastiaan. Ulosteseen ei saa sekoittua virtsaa. Siirretään ulostetta purkin kannessa kiinni olevalla lastalla heti ulostamisen jälkeen purkkiin noin ruokalusikallisen verran. Vetinen näyte voi antaa virheellisen tuloksen. Purkki suljetaan huolellisesti ja purkin ulkopuolen tulee olla puhdas.
- Kiinnitetään laboratorion saatu valmis tai itse täytetty nimitarra ulostepurkkiin. Tarrassa täytyy olla nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.
- Näytteenoton jälkeen ulostepurkki pakataan muovipussiin, joka suljetaan huolellisesti.

Säilytys ja kuljetus

Näyteputki on tuotava laboratorioon mahdollisimman pian, mieluiten jo näytteenottopäivänä. Suositellaan kylmäkuljetusta. Näytteen säilyvyysaika on 3 vrk jääkaapissa (2-8°C).