

JÄSTODLING OCH KÄNSLIGHETSBESTÄMNING

-HiiViHe (12046)

Jästinfektion som svarar dåligt på behandling
(hud eller slemhinna)

Provtagningsmaterial

- Geletransportör
- Namnetikett för geletransportören

Provtagning

Geletransportören som används för provtagningen tas ut ur skyddspåsen. Det ljusa locket på röret tas bort och slängs i blandavfallet. Provtagningspinnen tas ut ur skyddspåsen. Undvik att röra vid bomullsspetsen med fingrarna.

Hud: Hudområdet rengörs med vatten före provtagningen. Använd inte desinfektionsmedel. Provtagningspinnen gnuggas mot provtagningsområdet.

Slemhinna: Provtagningspinnen förs in i slidan till ett djup på cirka 5 cm och roteras i cirka 30 sekunder så att bomullsspetsen gnids mot slidväggen.

Efter provtagningen förs provtagningspinnens bomullsspets direkt ner i gelen i transportören. Det färgade locket i änden av provtagningspinnen ska sitta tätt på plats.

Skriv personuppgifter samt datum på etiketten och fäst den på geletransportören.

Förvaring och transport

Provet ska lämnas till laboratoriet samma dag som provtagningen utförs eller senast följande vardag. Provet ska förvaras i kylskåp vid +2–+8 °C.

