
EOSINOFIILIT, YSKÖKSESTÄ
Ex-Eos**Tutkimukseen valmistautuminen**

Näyte otetaan laboratorion saatuun purkkiin.

Näytteenotto

- Huuhtokaa suu vedellä ennen ysköksen ottamista.
- Yskikää voimakkaasti aamulla ennen ateriaa suoraan avattuun purkkiin.
- Ottakaa näytteeksi syvästä hengitysteistä tullutta aamuysköstä, EI SYLKEÄ. Kunnollisen ysköksen saamiseksi käytäkää tarvittaessa höyryhengitystä. Sulkekaa purkki hyvin.
- Kirjoittakaa tarraan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä. Kiinnittäkää tarra näytepurkin kylkeen.
- Laittakaa näytepurkki tiiviisti suljettavaan pussiin.

Näytteen kuljetus ja säilytys

Tuokaa näyte laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen, viimeistään kahden (2) tunnin kuluessa näytteenotosta. Jos näytettä ei voida tuoda heti, säilytetään se jääkaapissa. Kuljetus huoneenlämmössä.

Mikäli teillä on lääkärin tekemä hoitomääräys/tutkimuspyyntölomake, ottakaa se mukanaan.