

Verinäytteiden pakkaaminen talvipakkasilla

Verinäytteen jäätyminen voi tehdä siitä analyysikelvottoman. Kun lämpötila laskee alle -10°C :een, pakkaa näytteet, jotka eivät saa jäätyä (esim. PVK- ja TVK-näytteet) seuraavasti:



1. Pakkausmateriaalit: 2 kpl huoneenlämpöisiä geelejä, 2 kpl imuliinoja, iso Minigrip-pussi, pieni Minigrip-pussi / 5 näytettä, tasalämpöpakkaus (styrox + pahvilaatikko)



2. Laita pienessä Minigrip-pussissa olevat huoneenlämpöiset näytteet (5 kpl) kahden huoneenlämpöisen geelin väliin. Jos näytteitä on enemmän, käytä kahta Minigrip-pussia.



3. Kääri näytteet geeleihin kahteen imuliinaan ja laita ne isoon Minigrip-pussiin.



4. Kääri Minigrip-pussi tiiviiksi pakkaukseksi ja aseta se styrox-koteloon. Sulje kotelo ja teippaa tiiviiksi.



5. Laita styrox-kotelo pahvilaatikkoon. Sulje pahvilaatikko.



6. Jos käytössäsi on jäähauderasia (kuvassa harmaa), toimi kuten edellä, mutta käytä yhteensä 4 kpl geelejä.