

PAKETTI- JA RASITUSTUTKIMUSNÄYTTEIDEN PAKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN LÄHETIKULJETUKSISSA

Näyteputket, joissa on keskenään sama näyttenumero (viivakoodi) tulee pakata muista näytteistä erilleen alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Näytteiden pakkaamismuutokset koskevat niitä pakettitutkimusnäytteitä, joissa potilaasta on kaksi eri näytematriisin näyteputkea samalla näyttenumerolla (esim. seerumiputki + EDTA-putki) sekä niitä rasiustutkimusnäytteitä, joissa on sama näyttenumero eri aikapisteiden näytteissä.

Näytteiden pakkaaminen:

Samalla näyttenumerolla olevat näyteputket tulee pakata muista näytteistä erilleen **PUNAISEEN KANNELLISEEN STYROX-KOTELOON.**

- saman potilaan näyteputket laitetaan vierekkäin samaan koteloon, kotelossa voi olla usean eri potilaan näytteitä
- punainen styrox-kotelo ja imuliina laitetaan ison minigripin sisälle, joka suljetaan huolellisesti



Näytteiden lähettäminen:

Kaikki näytteet pakataan lähettikuljetuskassiin tai -laukkuun. Kassin tai laukun sivutaskussa oleva osoitekortti käännetään osoittamaan vastaanottajan osoitetta. Lähettikassit ja -laukut palautetaan asiakkaalle lähetin seuraavalla näytteiden noutokäynnillä.

Lähetys- ja kuljetustarviketilaukset voitte tehdä kotisivujemme tarviketilauslomakkeella www.yml.fi/tilaukset

Seuraavat tutkimukset pitää pakata pakettitutkimusohjeen mukaisesti:

Tutkimuskohtaiset ohjeet löytyvät kotisivuiltamme www.yml.fi → Laboratoriokäsikirja
 Asiakaskohtaisesti räätälöidyt tutkimuspaketit eivät löydy YML:n laboratoriokäsikirjasta.

Huom! Mikäli potilastietojärjestelmä, josta pyyntöjen tarrat tulostetaan, tulostaa jokaiselle näyteputkelle erilaisen näytenumeron, voi näytteet pakata muiden näytteiden sekaan, eikä tätä pakkausohjeistusta tarvitse noudattaa.

KL numero	Etuliite	Lyhenne	Tutkimusnimike
92	Pt-	ADA-I	Adenosiinideaminaasi pleuraneste/seerumi
4378	P -	APCres	APC-resistenssi
641	B -	Artr	Artriittitutkimus
643	Pt-	AIT-L	Autoimmuunitutkimus, laaja
9451	Li-	BorAbXL	Borrelia, vasta-ainepaketti, laaja, likvorista
1836	Li-	DengAb	Denguevirus, vasta-aineet likvorista
9250	Pt-	Diascr	Diascreen seulontatutkimus
1483	Pt-	Gluk-R1	Glukoosi-koee, oraalinen, lyhyt
9259	Pt-	GlukR1s	Glukoosi-koee, oraalinen, lyhyt, 0- ja 2 h näyte
9828	Pt-	GlukR1p	Glukoosi-koee, oraalinen, lyhyt, plasma
1484	Pt-	Gluk-R2	Glukoosi-koee, oraalinen, pitkä
4800	Pt-	Gluk-R6	Glukoosi-koee, oraalinen, raskaudenaikainen
3450	Li-	IgG-Ind	Immunoglobuliini G, indeksi
6168	Li-	IgG-Oc	Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen
3050	S -	CIC	Immunokompleksit, kiertävät
9717	Pt-	Infepak	Infektiopaketti
9102	Pt-	Keli-XL	Keliakiatutkimus, laaja ja HLA-tautiassoosiatutkimus
2146	Pt-	Krea-CI	Kreatiniinin poistuma
2197	Pt-	Lakt-R1	Laktoosi-koee
84	S -	MaksaT	Maksarasitustutkimus
9006	Pt-	Medisc2	Mediscreen 2 seulontatutkimus Diacarin käyttöön
115	Pt-	Mediscr	Mediscreen seulontatutkimus
9473	Pt-	MuistiS	Muistihäiriötutkimukset, suppea
9708	Pt-	MuistiM	Muistihäiriötutkimukset, medium
4490	-	TbNhO	Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihappo (kval)
6173	B -	TbIFNg	Mycobacterium tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erityis
9169	Pt-	PienYri	Pienyrityksen työterveystutkimuspaketti
647	Pt-	Pleur-T	Pleuriittitutkimus
648	Pt-	Pleur-L	Pleuriittitutkimus, laaja
650	S -	ReumaPa	Reumapaketti
9009	Pt-	Tark4	Tarkastuspaketti 4, Hb ja peruskemia
4025	P -	Trombot	Tromboositaipumuksen selvittely
9352	Pt-	TTHSCR	TTH-SCREEN terveyskartoitus
9354	Pt-	TTHSCRE	TTH-SCRELA terveyskartoitus, erittäin laaja
9353	Pt-	TTHSCRL	TTH-SCRLA terveyskartoitus, laaja
9077	fS-	Vakter	Vakuutus terveystarkastus, Tapiola
9673	Pt-	ValPak9	Valiopaketti-9
3632	Li-	VZVAb	Vesirokkovirus, vasta-aineet, likvorista

2474	B -	PVK+T	Perusverenkuva ja trombosyytit
------	-----	-------	--------------------------------

Mikäli halutaan trombosyytit sitraattiputkesta, tulee tämä pakata kuin pakettitutkimus.

2643	B -	Morfo	Solujen morfologinen tarkastelu
------	-----	-------	---------------------------------

Mikäli lähetetään sekä lasit että putki, tulee tämä pakata kuin pakettitutkimus

3696	B -	TVK	Täydellinen verenkuva
------	-----	-----	-----------------------

Mikäli lähetetään sekä putki että lasit, tulee tämä pakata kuin pakettitutkimus
