

## Non-invasiivinen prenataalitutkimus (NIPT) – NÄYTTEENOTTO-OHJE

Äidin verinäytteestä tehtävää NIPT-tutkimusta varten tarvitaan oma 10 ml veriputki, joka on tarkoitettu soluvapaan DNA:n keräämiseen kokoverestä (Cell-free DNA BCT® CE, maastokuvioinen korkki). Putkia tilataan nettisivuiltamme <http://www.yml.fi> Tilaukset-välilehdeltä löytyvän Tilauslomakkeen kautta (ensin tulee rekisteröityä käyttäjäksi).

### Ennen näytteenottoa


NIPT-näytteitä voidaan ottaa vain alkuviikosta ma-ke. Keskiweekona otettujen näytteiden tulee olla laboratoriossamme viimeistään torstaina klo 12. Tämä on tärkeää, jotta näytteet saadaan tutkittaviksi ajoissa!

Ennen näytteenottoa potilaalle annetaan luettavaksi NIPT-potilasinfo ja muutoinkin annetaan tarvittava tieto tutkimuksesta. Samalla täytetään NIPT-tutkimuslähete (RN) kaikilta osin. Huomioi, että kaikki kysytyt tiedot ovat tärkeitä tutkimuksen onnistumiseksi. Lisäksi on tärkeää, että potilas allekirjoittaa NIPT-tutkimuslähetteen (ilman allekirjoitusta tutkimusta ei voida tehdä).



### NÄYTTEENOTTO

- 1) Laita henkilötunnistetarra putkeen.
- 2) Ota putki täyteen näytettä (näytettä oltava minimissään 7 ml yhdessä putkessa).
- 3) Sekoita näyte välittömästi näytteenoton jälkeen kääntelemällä putkea hellästi 8-10 kertaa. Näytteen kunnollinen sekoittuminen on tärkeää sen säilyvyyden kannalta.

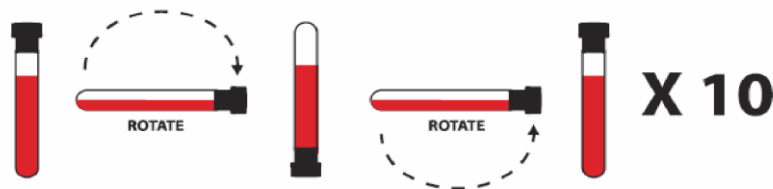

- 4) Näyte säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä. Näyte EI SAA jäätyä!
- 5) Lähetä näyte ja **potilaan allekirjoittama** NIPT-tutkimuslähete välittömästi näytteenoton jälkeen YML:n laboratorioon (Genetiikan yksikkö, Kivihaantie 7, 00310 Helsinki). Näytteen voi lähettää normaalisti lähetin mukana/ postissa, mutta **huomioi että näytteen tulee olla laboratoriossa näytteenotosta seuraavana päivänä. Torstaina viimeistään klo 12.**

**TIEDUSTELUT:** YML, Genetiikan yksikkö puh. 050-409 0863 tai Asiakaspalvelu puh. 09-52 561